

试剂信息

名称	规格	样本信息
病毒DNA/RNA提取试剂盒 (CDC专用)	预封装20T/64T	血清、血浆、拭子洗液、病毒培养物等
病毒DNA/RNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：20T/40T/64T	血清、血浆、拭子洗液、病毒培养物等
全血基因组DNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：20T/40T/64T	EDTA或柠檬酸钠处理的新鲜、冷冻血液
干血斑基因组DNA提取试剂盒	预封装：20T、40T、64T	标准型、加强型、FTA等各种血液采集卡上的血斑
细菌基因组DNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：20T、64T	痰液、拭子洗液、细菌培养物等
植物组织基因组DNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：20T、64T	叶片、根、茎、种子等
植物组织总RNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：64T	叶片、根、茎、种子等
动物组织基因组DNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：20T、64T	肝、肾、脑、肌肉组织等
动物组织总RNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：64T	肝、肾、脑、肌肉组织等
动物深加工基因组DNA提取试剂盒	预封装：20T、64T	鱼粉、鱼油、肉酱、动物饲料等
FFPE组织DNA提取试剂盒	非预封装：20T 预封装：20T	石蜡包埋组织、切片等
血清/血浆游离DNA提取试剂盒	非预封装：20T 预封装：20T	血清、血浆
高纯度质粒DNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：64T	菌悬液、菌落等
琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒	非预封装：50T 预封装：64T	凝胶块、PCR扩增产物等
口腔拭子基因组DNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：64T	口腔拭子洗液
唾液基因组DNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：64T	唾液
羊水基因组DNA提取试剂盒	非预封装：50T 预封装：64T	羊水
真菌基因组DNA提取试剂盒	非预封装：50T	菌丝、菌落等


分子检测PCR实验室整体解决方案



性能参数

项目	参数		
样本通量	15	32	48
处理体积	50-1500μl	30-1000μl	30-1000μl
磁珠残留量	≤1%		
使用耗材	单条五联管	96深孔板, 单条六联管	96深孔板
加热温度	/	裂解: 室温至120°C 洗脱: 室温至120°C	/
低噪音处理	单台仪器运行最大噪音<65dB		
震荡混合	多模式多档可调		
试剂种类	磁珠法提取试剂		
操作方式	A.手机/平板电脑 (Andriod系统) 远程操控; B.机屏按键操作		
实验存储	仪器内部最多可存储15组程序, Android软件可存储>500组程序		
程序管理	可灵活新建、编辑、应用及删除相应程序		
污染控制	内置紫外消毒		
断电保护	意外断电再供电时, 可自由选择是否继续运行实验。		
接口类型	USB, 以太网, USB Type-B		
网络通讯	手机/平板电脑wifi远程控制, 可扩展以太网远程控制		
尺寸	440mm×435mm×445mm W×D×H		
重量	31.5kg		
使用电源	AC110-240V, 50Hz/60Hz, 600W		
操作温度范围	10°C-40°C		
操作湿度范围	低于80%		

金牌服务

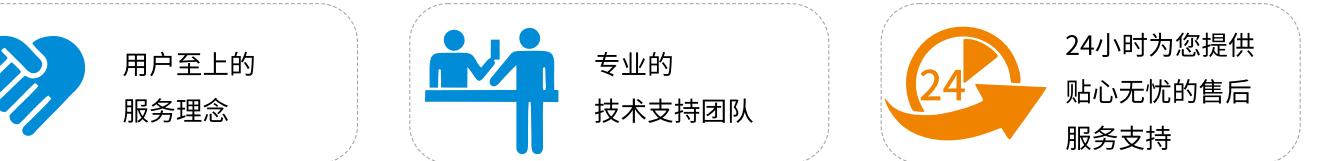

西安天隆科技有限公司

地址: 西安国家经济技术开发区朱宏路389号
电话: +86-29-8221 8051 传真: +86-29-8221 6680
<http://www.medtl.com>

苏州天隆生物科技有限公司

地址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区7栋5层
电话: +86-512-6252 7726 传真: +86-512-6295 6337
<http://www.medtl.cn>



本公司保留更改产品设计与规格的权利。2020年8月印 (第五版)



NMPA CE FDA




NP968-S 磁珠法核酸提取系统

Nucleic Acid Extraction System


为人类健康创造一流分子诊断产品
Bring Technology to Life!

产品优势

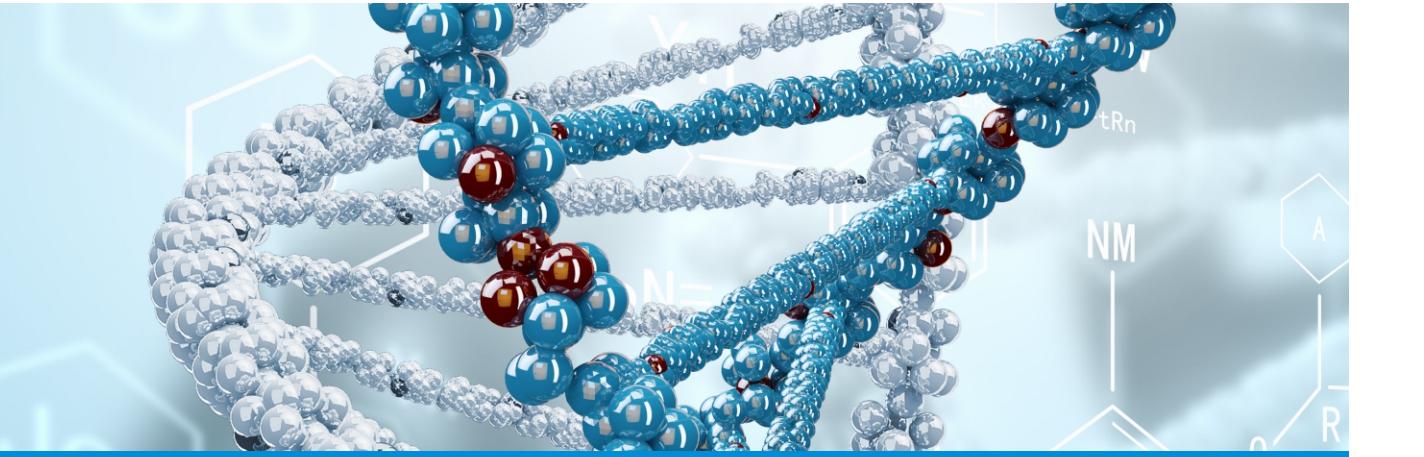


技术原理

裂解液裂解细胞后，游离出来的核酸分子被磁珠特异性吸附，通过内置磁棒磁吸、转移等动作使磁吸颗粒（磁珠-核酸分子混合物）与裂解液分离，反复洗涤去除杂质后，将核酸分子溶解在洗脱液中，即可完成整个实验，得到高纯度的核酸。

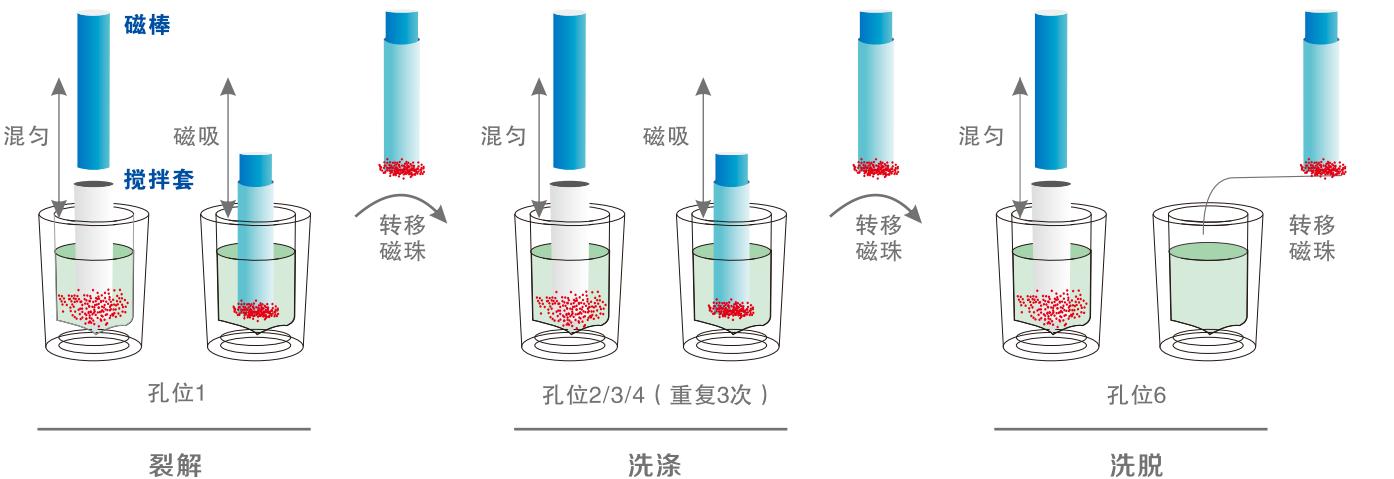

技术应用

核酸提取对于基因扩增、荧光定量PCR、基因测序、基因芯片及核酸质谱等实验都至关重要，样本核酸的提取效率和质量直接影响后续检测及研究。天隆NP968-S核酸提取系统利用磁珠法吸附技术，可同时处理1-15/32/48个样品，能广泛用于疾病防控、动物疫控、临床诊断、出入境检验检疫、食品安全及科学研究等领域的样本前处理。

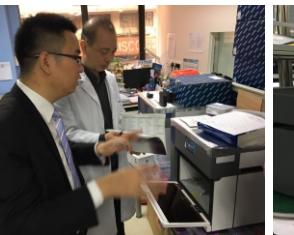

香港病理检验中心客户



新加坡客户大量定制

多通量模块可配置

采用“模块化”设计理念，独家设计15、32、48三种通量模块，满足您的多种工作需求。



双操作模式

除继承原有经典机屏按键操作外，独家开发的基于安卓系统的核酸提取APP，通过WiFi网络实现Pad/手机与仪器的通讯连接，进行程序操作。



超静音运行



仪器磁力架运行振幅及频率可智能调节，搭配超静音电机及内部风路系统设计，运行声音保持65分贝以内(<65dB)，工作环境更加安静舒适。

高效稳定的样本处理能力

样本	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
A260/A280	1.80	1.81	1.81	1.79	1.81	1.80	1.80	1.81
A260/A230	2.04	2.05	2.03	2.03	2.04	2.03	2.02	2.05
ng/ μ l	106.1	107.0	106.5	106.4	106.8	106.3	106.5	106.7

表1.200 μ L全血样本提取结果 (数据来源：湖南省妇幼保健院)

配合天隆预封装试剂及低吸附提取耗材，仅需一步人工加样，整个提取过程均在实验舱内进行，最大限度降低人为因素引起的误差。

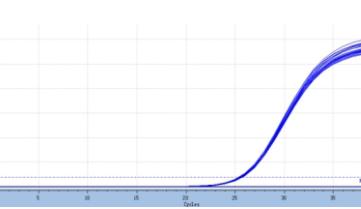


图1. 同一乙肝血清样本仪器提取后Real-time PCR检测结果 (数据来源：石家庄六院)



图2. 武汉方舱医院使用NP968-S检测新冠病毒

污染控制和自我清洁

独有的样本交叉污染控制系统和紫外消毒功能，杜绝交叉污染。



系统安全可靠

开门自动锁定，实验舱封闭运行搭配一次性耗材等，最大程度减少操作者与样本和试剂的接触，避免有害物质对人体的危害。